

Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации Ступеньки с поручнем для ванной комнаты

Производитель: Фошан Донгфанг Медикал
Эквипмент Мануфэктори (КНР)
Поставщик: ООО «Мега-Оптим» (Россия)
Модель: **FS 569**



Основные технические характеристики:

Высота ступеней	150, 260 мм
Размер ступеней	410x220 мм
Высота поручня	920 мм
Допустимая нагрузка	125 кг
Вес	4,2 кг



Поручень для ванной комнаты предназначен для ухода за больными в условиях стационара или в домашних условиях. Рама выполнена из хромированной стали и не подвергается коррозии. Резиновые наконечники на всех 6-ти ножках препятствуют скольжению, не оставляя следов на поверхности и обеспечивают безопасность пациента. Ступени выполнены из высокопрочного рифленого пластика, устойчивого к воздействию воды. Снабжены отверстиями для стока воды. Поручень устанавливается как под правую, так и под левую руку.

Обслуживание и уход при эксплуатации

При эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия:

1. Не допускать контакта изделия с нагревательными элементами, воздействию прямых солнечных лучей.
2. Разрешается мытье изделия тёплой водой с применением мягких моющих средств.
3. При необходимости следует протирать (дезинфицировать) влажной тряпкой, смоченной в 0,5 - 1,0% растворе хлорамина.
4. После влажной санитарной обработки необходимо вытереть изделие насухо.
5. Запрещается проводить санитарную обработку изделия растворами на основе щелочей, растворителей, разбавителей, ацетонов и прочих растворов.

Гарантийные обязательства

Гарантируется соответствие требованиям нормативных документов ГОСТ Р 51632-2000, стандарты серии ГОСТ Р ИСО 10993 при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи изделия. Срок хранения – 3 года.

Сведения о сертификации

Декларация о соответствии № РОСС CN.AB51.Д09988,
срок действия с 16.12.2014г. по 15.12.2017г.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи _____

Дата изготовления _____

ООО «Мега-Оптим»

Контактный телефон: **(495) 968-80-83**

Адрес: 143396, Россия, г. Москва, поселение Первомайское,
хутор Ильичёвка, стр. 3.

Подпись продавца _____

Подпись покупателя _____

www.mega-optim.ru