



Инструкция по эксплуатации

TU 34

Благодарим Вас за выбор продукции Ortonica.

Убедительно просим Вас перед началом эксплуатации многофункционального складного стула с санитарным оснащением ознакомиться с инструкцией по применению.

Содержание

1. Общая информация

| | | |
|-----|---------------------------------------|---|
| 1.1 | Назначение..... | 2 |
| 1.2 | Область применения..... | 2 |
| 1.3 | Ответственность..... | 2 |
| 1.4 | Примечания..... | 2 |
| 1.5 | Указания по технике безопасности..... | 3 |
| 1.6 | Особенности стула..... | 4 |

2. Распаковка и сборка

| | | |
|-----|--------------------------|---|
| 2.1 | Комплектация..... | 5 |
| 2.2 | Распаковка и сборка..... | 5 |

3. Эксплуатация

| | | |
|-----|--------------------|---|
| 3.1 | Пересаживание..... | 7 |
|-----|--------------------|---|

4. Регулировки

| | | |
|-----|--------------------------------|---|
| 4.1 | Подножки и опоры для стоп..... | 8 |
| 4.2 | Подлокотники..... | 8 |
| 4.3 | Спинка..... | 9 |
| 4.4 | Стояночные тормоза..... | 9 |

5. Технические характеристики

6. Техническое обслуживание и уход

7. Гарантийное обслуживание

1. Общая информация

1.1 Назначение

Кресло-стул с санитарным оснащением предназначено для облегчения ухода за тяжелобольными и инвалидами с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

1.2 Область применения

Кресло-стул с санитарным оснащением используют, как в стационарных медицинских учреждениях, так и в домашних условиях.

1.3 Ответственность

Изготовитель несет ответственность только при использовании изделия в заданных условиях и в соответствии с предусмотренным назначением. Изготовитель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с данной инструкцией. Изготовитель не несет ответственности за повреждение вследствие использования неразрешенных элементов и запасных частей.

1.4 Примечания

Обновление последней редакции инструкции по эксплуатации Вы найдете на нашем сайте ortonica.ru

Значение символов



Обратите внимание



Шестигранный ключ
№ 4; 6; 9



Важная информация



Воспользуйтесь
плоской отверткой



Воспользуйтесь
крестовой отверткой



Воспользуйтесь
накидным ключом



Актуальность инструкции по эксплуатации

Высокий уровень безопасности и качества стульев с санитарным оснащением обеспечивается постоянным их совершенствованием. Это может стать причиной неполного соответствия между описанием и фактическим исполнением санитарного стула.

1.5 Указания по технике безопасности



Для безопасной эксплуатации стула с санитарным оснащением необходимо соблюдать меры предосторожности и следовать правилам техники безопасности.

Перед усадкой пациента в стул с санитарным оснащением на колёсах убедитесь, что задние колеса зафиксированы тормозами.

Опасность получения травмы при посадке. При пересаживании следует заранее поднять опоры для стоп вверх и откинуть подножки.

Предохраняйте кресло-стул от ударов и повреждений.

Не допускайте прикосновения кресла-стула к электрическим проводам.

1.6 Особенности стула



2. Распаковка и сборка

2.1 Комплектация



В комплект входят:

- картонная коробка 1 шт.;
- стул с санитарным оснащением (в комплекте) 1 шт.;
- инструкция по эксплуатации 1 шт.

2.2 Распаковка и сборка




Стул с санитарным оснащением упакован в картонную коробку, которую мы рекомендуем сохранить. Поставка стула с санитарным оснащением осуществляется, как правило, в полностью смонтированном и сложенном состоянии.

Достаньте все детали из коробки. Для приведения стула с санитарным оснащением в состояние эксплуатационной готовности достаточно выполнить несколько простых ручных операций:

1. Вставьте спинку в разъемы на раме.



2. Установите нижнюю часть сиденья с санитарным ведром.

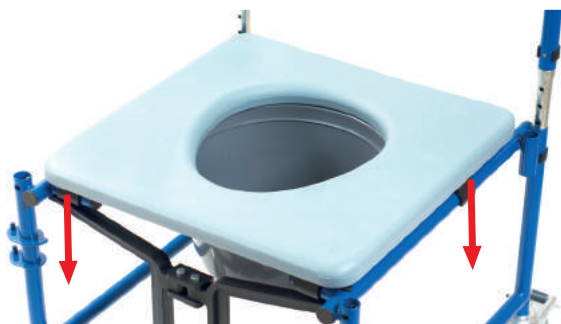


3. Установите подножки в крепления на раме. Опустите опоры для стоп.



3. Эксплуатация

3.1 Пересаживание

Помните, что, совершая пересаживание, во всех случаях лучше воспользоваться сторонней помощью, чтобы предупредить возможность получения травм.

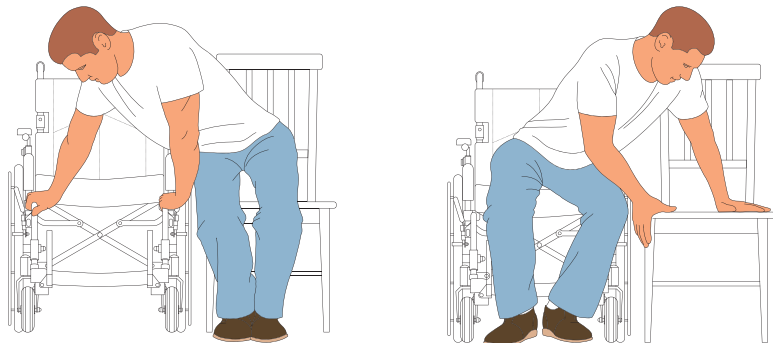


Общие правила пересаживания:

1. Как можно ближе расположите стул с санитарным оснащением к месту пересаживания, либо к себе, если пересаживаетесь на стул с санитарным оснащением.
2. Пересаживание осуществляйте только на ровных поверхностях, избегая наклонные.
3. Заблокируйте задние колеса тормозами.
4. Откиньте подлокотники.
5. При пересаживании со стула с санитарным оснащением опустите ноги с опоры для стоп на пол и, удерживаясь руками за устойчивую опору, не зависимую от стула, перенесите вес тела на руки и осуществите высадку со стула. При пересаживании на стул с санитарным оснащением необходимо опереться одной рукой о подножку санитарного стула и совершить пересаживание.

4. Регулировки


4.1 Подножки и опоры для стоп

Подножки регулируются по высоте. Чтобы отрегулировать подножку, необходимо поднять рычаг вверх. Затем зажать кнопки-фиксаторы на подножке, изменить ее высоту.

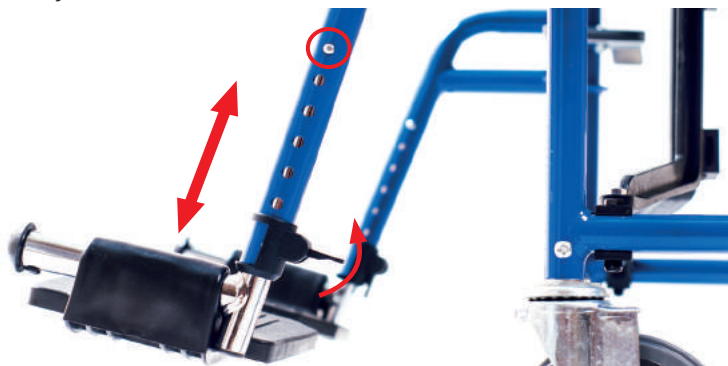

4.2 Подлокотники

Для удобства пересаживания предусмотрены съемные подлокотники. Чтобы снять подлокотник, необходимо нажать на фиксатор и поднять подлокотник вверх.

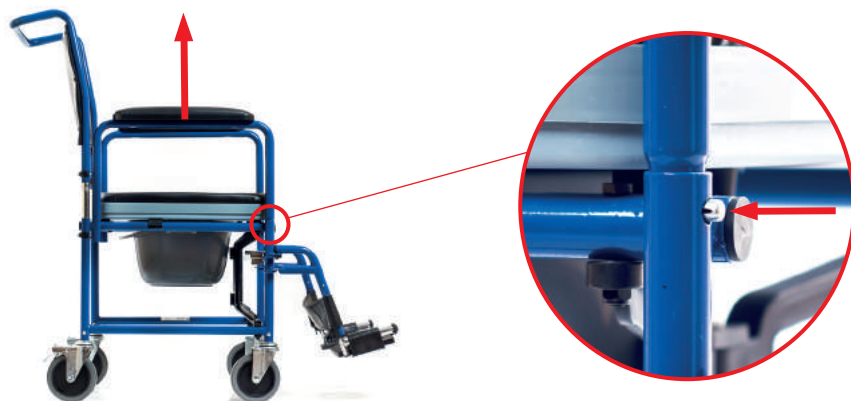

4.3 Спинка

Спинка регулируется по высоте. Для регулирования спинки по высоте, необходимо снять штифтовой фиксатор, затем установить необходимую высоту и закрепить штифтовым фиксатором.



4.4 Стояночные тормоза

Стул с санитарным оснащением оборудован стояночными тормозами слева и справа. Для фиксации задних колес нажмите на фиксатор.



5. Технические характеристики

| | | | |
|--|-----------|------|-----|
| Ширина сиденья (варианты исполнения), мм | 430 | 455 | 505 |
| Общая длина, мм | 1000 | | |
| Общая ширина (варианты исполнения), мм | 520 | 545 | 595 |
| Высота спинки (регулируемая), мм | 350 - 430 | | |
| Глубина сиденья (нерегулируемая), мм | 440 | | |
| Угол наклона спинки (нерегулируемый) | 90° | | |
| Вес стула (варианты исполнения), кг | 13,4 | 13,6 | 14 |
| Грузоподъемность, кг | 130 | | |

Данные размеры приведены справочно и могут быть изменены без согласования с потребителем. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию стула с санитарным оснащением, не ухудшающие его потребительских свойств.

6. Техническое обслуживание и уход

Рекомендуется ежемесячно проверять соединения передних и задних колес, подножек, на отсутствие люфтов, степень загрязнения подшипников, степень износа деталей, резьбовые соединения; проводить визуальный контроль быстроизнашивающихся деталей (например, колес, подшипников).

Обладая определенными техническими навыками, Вы сможете самостоятельно производить обслуживание узлов изделия, способствуя их безотказной работе:

- Необходимо периодически снимать передние колеса и очищать их от грязи и волос, а также обследовать на предмет повреждений. Очищайте пластиковую поверхность неагрессивным чистящим средством. Движущиеся части слегка смазывайте машинным маслом.

- Периодически проверяйте затяжку резьбовых соединений. Любые резьбовые соединения не должны крутиться от руки без сопротивления.

Уход

Для чистки обивки и ремней используйте теплую воду и неагрессивное моющее средство. Пятна выводите при помощи губки или мягкой щетки.

Допускается влажная очистка пластмассовых деталей, элементов рамы, ходовой части и колес агрессивными чистящими средствами, после чего эти элементы необходимо хорошо высушить.

7. Гарантийное обслуживание

Модель: Ortonica TU 34

Гарантийный срок эксплуатации: 1 год

Производитель: «Джензианг Ашуре Медикал Экуипмент Ко. Лтд.», Китай, ZhenJiang Assure Medical Equipment Co. Ltd. NO.3. factory, Xingdingmao Industry Park, Dingmao Development Zone, Zhenjiang city, Jiangsu Province, China.

Импортер в России: ООО «Медрус»

Адрес: 394026 г. Воронеж, Московский пр-т, 11

Тел: +7 (473) 300-31-91

По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете обратиться по телефону: **8-800-707-44-52**

по почте: service@ortonica.ru



8-800-500-14-14

ortonica.ru