

B.Well

С заботой о каждом

Инструкция по эксплуатации (руководство по эксплуатации)

WA-C-ML

Манжета конусная на плечо
размера M-L

Универсальная,
для обхвата руки 22-42 см



 PRO

 MED

 TECHNO

Уважаемый покупатель!

Компания V.Well благодарит Вас за покупку манжеты для автоматических приборов для измерения артериального давления и пульса.

1. ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО РАЗМЕРА МАНЖЕТЫ

Использование манжеты, не соответствующей размеру руки пользователя, искажает результат измерения артериального давления.


Если манжета мала, результат измерения будет завышен. Если велика – занижен. Компания V.Well предлагает манжеты двух основных типоразмеров (размер манжеты указан на обложке инструкции).

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Манжета
2. Соединительная трубка.
3. Коннектор для соединения с автоматическим измерителем артериального давления.
4. Руководство по эксплуатации, совмещенное с гарантийным талоном.

3. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1 Проденьте конец манжеты через металлическое кольцо так, чтобы точка входа воздушной трубки в манжету располагалась с внешней стороны.
- 2 Проденьте руку в манжету так, чтобы воздушная трубка располагалась вдоль руки по направлению к Вашей ладони.
- 3 Расположите манжету на руке таким образом, чтобы ее нижний край находился на расстоянии 2-3 см выше локтевого сгиба. Красная метка Φ ^{ARTERY} _{MARK} (Artery mark) должна находиться над локтевой ямкой.
- 4 Плотнo, но не слишком туго, с учетом конусности руки затяните манжету, потянув за свободный конец.
- 5 Манжета должна плотно облегалa руку, иначе результат измерения будет неправильным. Манжета должна находиться на уровне сердца. Не рекомендуется одевать манжету поверх одежды.
- 6 Положите руку ладонью вверх. Следите за тем, чтобы шланг не перекручивался.
- 7 Спокойно посидите несколько минут перед измерением

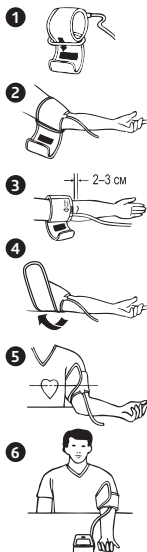

⚠ ВАЖНО! Измерения можно проводить не только на левой, но и на правой руке, но необходимо учитывать, что давление на разных руках – разное. В любом случае, для контроля и сопоставления результатов измерения уровня артериального давления, измерение необходимо проводить на одной и той же руке (на той, где артериальное давление выше).

Манжеты V.Well являются конусными и повторяют строение руки. Специальная анатомическая форма обеспечивает плотное прилегание манжеты к плечу, что способствует проведению точного измерения.

4. ХРАНЕНИЕ И УХОД

Избегайте сильного сворачивания манжеты и скручивания соединительных трубок. Оберегайте манжету и соединительную трубку от острых предметов.

Для поддержания гигиены (частое использование, длительное хранение, использование разными людьми) материал манжеты можно стирать, предварительно вынув пневмокамеру через специальное технологическое отверстие.

⚠ Пневмокамеру стирать нельзя!
Режим стирки материала манжеты – ручная, 30°C.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип манжеты	Описание
Манжета конусная на плечо размер M-L	Универсальная манжета для окружности руки 22-42 см
Манжета конусная на плечо размер M	Стандартная манжета для окружности руки 22-32 см
Условия эксплуатации	Температура: от +10 °C до +40 °C Влажность: от 15% до 90%
Условия хранения	Температура: от -10 °C до +60 °C Влажность: от 15% до 90%

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель обеспечивает гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты приобретения манжеты. При обнаружении производственного дефекта в течение срока гарантии неисправная манжета будет заменена на новую бесплатно. Гарантийные обязательства действительны только при наличии кассового чека или полностью заполненного гарантийного талона с печатью торгового предприятия или центра технического обслуживания.

Гарантийные сроки службы установлены в соответствии со статьями № 470 и № 471 ГК РФ и статьей № 19 п. 3 Закона «О защите прав потребителей» (с изменениями от 11 июня 2021 года). Гарантийный срок эксплуатации манжеты – 1 год.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы равен 3 годам.

Соответствие стандартам

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4964 от 16.11.2018 г.

Манжеты к приборам для измерения артериального давления (код ОКПД 2 26.60.12.140) согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» обязательной сертификации и декларированию не подлежат.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация возможна вместе с бытовыми отходами.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН B.Well

(заполняется торговым представителем)

Модель _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20 ____ г.

Печать торгового представителя: _____

Подпись продавца: _____ Подпись покупателя: _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

(заполняется службой сервиса)

Наименование прибора: _____

Дата обращения: « ____ » _____ 20 ____ г.

Характер неисправности _____

Выполнение работы: _____

Адреса сервисно-консультационных пунктов в Вашем городе Вы можете узнать на сайте www.bwell-swiss.ru.

Информацию по техническому обслуживанию, как в рамках настоящей гарантии, так и платному, можно получить в авторизованном сервисном центре или по телефону бесплатной горячей линии по России **8-800-200-33-22**.

Политика компании B.Well Swiss предусматривает постоянное совершенствование продукции. В связи с этим компания оставляет за собой право вносить полные или частичные изменения в продукцию без предварительного уведомления и в соответствии с производственными требованиями.

Дата изготовления указана в номере LOT данной инструкции по эксплуатации. Первая и вторая цифры (WW) – неделя производства, третья и четвертая (YY) – год производства.

LOT : WWYY

Производитель: **B.Well Swiss AG**
(Би.Велл Свисс АГ), Швейцария
Место производства: **Андон Хэлс Ко., Лтд.,**
№ 3 Джинпинг Стрит, ЙаАн Роуд,
Нанкай Дистрикт Тианджин, 300190
Китай

Бесплатная горячая линия

8 800 200 33 22

Официальный импортер, уполномоченная производителем
организация, принимающая претензии: АО «Альфа-Медика»
125493, РФ, г. Москва, ул. Авангардная д. 3,
пом. 1, эт. 4, офис 2402. www.bwell-swiss.ru